

Gebrauchsanweisung

Zeolith MED® • Bentonit MED® • ZeoBent MED®

ZUR ENTLASTUNG DER LEBER DURCH ENTGIFTUNG DES DARMTRAKTES DURCH BINDUNG VON QUECKSILBER, BLEI, CADMIUM, ALUMINIUM, AMMONIUM UND HISTAMIN

Zeolith MED®, Bentonit MED® und ZeoBent MED® können täglich für die ganze Familie als natürliche Bioregulatoren zum Schutz der Gesundheit zur Vorbeugung und Linderung von Symptomen verwendet werden, deren Ursachen auf eine Belastung mit Schadstoffen zurückzuführen sind.

Die natürlichen Medizinprodukte können im Magen-Darm-Trakt wie ein Schwamm Schadstoffe binden und auf natürlichem Weg aus dem Körper ausleiten. Die an die unverdaulichen Medizinprodukte gebundenen Schadstoffe werden ohne den Stoffwechsel zu belasten natürlich mit dem Stuhl über den Darm ausgeschieden. Durch die Bindung (Adsorption) von:

- Schwermetallen (Quecksilber, Blei, Cadmium)
- Aluminium
- Ammonium
- Histamin

können die Medizinprodukte zur Entlastung der Leber durch Entgiftung des Darmtraktes angewendet werden.

Zeolith MED® ist ein natürliches Medizinprodukt aus Klinoptilolith-Zeolith, welches unverdaulich und wasserunlöslich ist, eine hohe selektive Adsorptionsfähigkeit sowie Molekularsiebfunktionen gegenüber verschiedenen Schadstoffen besitzt und deshalb zur Detoxikation (Entgiftung) geeignet ist.

Bentonit MED® ist ein natürliches Medizinprodukt aus Montmorillonit-Bentonit, was an seiner Oberfläche und den Schichtzwischenräumen verschiedene Schadstoffe binden kann. Es ist unverdaulich, wasserunlöslich sowie quellfähig und bildet bei peroraler Verabreichung einen dünnen Montmorillonitgel-Schutzfilm. Dieser Gelschutzfilm belegt die Schleimhaut von Magen und Darm, wodurch die Wirkung gegenüber krankheits-erregenden Faktoren herabgesetzt und die Nervenendigungen des Magens und Darms beruhigt werden können.

ZeoBent MED® ist ein natürliches Medizinprodukt aus den unverdaulichen, Schadstoffe bindenden Naturmineralien Zeolith (Klinoptilolith) und Bentonit (Montmorillonit). ZeoBent MED® vereint die sich ergänzenden Wirkeigenschaften dieser beiden siliziumreichen Naturmineralien.

ZUR VORBEUGUNG

Als Prävention (Vorbeugung) bezeichnet man jede Maßnahme, die eine Beeinträchtigung der Gesundheit (Krankheit, Verletzung) verhindern oder verzögern kann bzw. weniger wahrscheinlich werden lässt.

Vorbeugung ist die beste Medizin. Die Medizinprodukte Zeolith MED®, Bentonit MED® und ZeoBent MED® können unerwünschte Schadstoffe bereits im Verdauungssystem binden noch bevor diese vom Organismus aufgenommen werden und damit helfen, Erkrankungen zu vermeiden, die im Zusammenhang mit erhöhten Schadstoffbelastungen stehen.

ZUR LINDERUNG

Die Anreicherung von toxisch wirkenden Metallen wie Quecksilber, Blei, Cadmium, Aluminium und anderen Stoffen wie Ammonium und Histamin kann Ursache einer Vielzahl chronischer Erkrankungen sein. Die schadstoffbindenden und -ausleitenden Eigenschaften von Zeolith MED®, Bentonit MED® und ZeoBent MED® können je nach Bedarf insbesondere bei erhöhter Histaminbelastung und Histaminintoleranz wie z. B. bei Allergien, Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, Leberfunktionsstörungen bzw. erhöhter Leberbelastung durch Ammoniumverbindungen therapeutisch bzw. therapiebegleitend genutzt werden.

ZEOLITH MED® + FLOHSAMEN BENTONIT MED® + FLOHSAMEN ZEOBENT MED® + FLOHSAMEN

Natürliche Medizinprodukte zur Entlastung der Leber durch Entgiftung des Darmtraktes durch Bindung von Quecksilber, Blei, Cadmium, Aluminium, Ammonium, Histamin. Flohsamenschalen sind bedingt durch ihre große Quellfähigkeit mechanisch wirkende Laxanzien, die somit die Wirkung von Zeolith und Bentonit unterstützen.

Indische Flohsamenschalen – ein natürlicher Ballaststoff zur Darmreinigung

Zur Unterstützung einer natürlichen Verdauung und Förderung der Darmgesundheit werden Flohsamenschalen (Psyllium) immer beliebter. Als rein pflanzliches Lebensmittel liefern sie einen hohen Gehalt an bekömmlichen und hervorragend quellfähigen Schleimstoffen zur cholesterinbewussten und ballaststoffreichen Ernährung. Bei Kontakt mit Wasser kommt es durch Quellung der fein gemahlene Flohsamenschalen zu einer starken Volumenzunahme des Darminhaltes, wodurch der Reiz auf die Darmwand erhöht, die Darmperistaltik verstärkt und die Darmentleerung erleichtert wird. Wegen seiner stuhlerweichenden Wirkung kann indisches Flohsamenschalenpulver zur Darmreinigung mit angenehmerer Darmpassage und Regulierung des Stuhlgangs beitragen.

DOSIERUNG UND DAUER

Pulver

Falls von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, kurweise, z.B. 40 Tage, einnehmen und langsam einschleichen: 1x täglich 1 Teelöffel (3g) Pulver Zeolith MED®, Zeolith MED® + Flohsamen, Bentonit MED®, Bentonit MED® + Flohsamen, ZeoBent MED®, ZeoBent MED® + Flohsamen in ca. 250 ml Wasser verquirlt zu den Mahlzeiten trinken. Bei Bedarf kann die Anwendung langsam auf 2x täglich, maximal 3x täglich gesteigert werden.

Pulver ultrafein

Falls von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, kurweise, z.B. 40 Tage, einnehmen und langsam einschleichen: 1x täglich 1/2 Teelöffel (1g) Pulver ultrafein Zeolith MED® oder ZeoBent MED® in ca. 250 ml Wasser verquirlt zu den Mahlzeiten trinken. Bei Bedarf kann die Anwendung langsam auf 2x täglich, maximal 3x täglich gesteigert werden.

Kapseln

Falls von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, kurweise, z.B. 40 Tage, einnehmen und langsam einschleichen: 1x täglich 1–2 Kapseln Zeolith MED®, Bentonit MED® oder ZeoBent MED® mit ca. 250 ml Wasser zu den Mahlzeiten einnehmen. Bei Bedarf kann die Anwendung langsam auf 2x täglich, maximal 3x täglich gesteigert werden.

REGELMÄSSIGKEIT, RHYTHMUS UND ANWENDUNGSZEITEN

Die Regelmäßigkeit der Anwendung beeinflusst die Wirksamkeit, Unterbrechungen können diese vermindern. Finden Sie nachstehend einfach Ihre für Sie passenden Zeitfenster. Nach Karl Hecht, Dr. med. Dr. med. habil. Prof. für Neurophysiologie em. Prof. für experimentelle und klinische pathologische Physiologie der Charité / Humboldt-Universität zu Berlin, empfehlen sich chronobiologisch bei der inneren Anwendung am Menschen folgende

Tageszeiten: 6 – 8 Uhr, 13 – 15 Uhr, 18 – 20 Uhr,
für die Nachtversorgung: 22 Uhr

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN

Nach Einnahme von Medikamenten soll ein Zeitabstand von mindestens 2 Stunden eingehalten werden. Nicht zeitgleich mit alkoholischen, koffein- und säurehaltigen Getränken wie Grapefruit-, Orangen-, Zitronen- und Ananassaft anwenden.

NEBENWIRKUNGEN

In seltenen Fällen kann bei zu geringer Flüssigkeitszufuhr Verstopfung auftreten. Dieser Effekt ist dosisabhängig und kann durch ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Dosisreduktion vermieden werden. Bei auftretender Verstopfung ist die Flüssigkeitszufuhr zu erhöhen, die Dosierung zu reduzieren und ggf. Ihr Arzt zu konsultieren. In seltenen Fällen können durch Flohsamen Völlegefühl, Bauchschmerzen oder Übelkeit auftreten. Dieser Effekt ist oft dosisabhängig und kann durch ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Dosisreduktion vermieden werden. Bei Auftreten von Völlegefühl, Bauchschmerzen oder Übelkeit ist die Flüssigkeitszufuhr zu erhöhen, die Dosierung zu reduzieren und ggf. Ihr Arzt zu konsultieren.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Zeolith MED®, Bentonit MED® und ZeoBent MED® sind kein Ersatz für ein Antiallergikum.

Um die Entgiftungs- und Regulierungsprozesse zu unterstützen, ist während der Einnahme der Medizinprodukte für reichliche Flüssigkeitszufuhr zu sorgen, sowohl bei der Einnahme (0,25 Liter Wasser) als auch in Bezug auf die Tagesration (2–3 Liter/Tag). Bei schweren Störungen der Nierenfunktion (wie z. B. Niereninsuffizienz) dürfen die Medizinprodukte nicht eingenommen

werden. Bei einem medizinischen Problem, bei eingeschränkter Nierenfunktion, während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren sollten die Medizinprodukte nur nach Absprache mit einem Arzt verwendet werden.

Die Medizinprodukte dürfen nicht inhaliert (eingeatmet) und nicht am Auge angewendet werden. Spülen Sie bei Augenkontakt die Augen ausreichend.

Nicht zur ununterbrochenen Daueranwendung bestimmt.

Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie einen unüblichen Effekt bemerken.

LAGERUNG UND VERWENDBARKEIT

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 6 Jahren auf.

Schließen Sie die Verpackungseinheit immer nach der Verwendung. Lagern Sie das Produkt trocken und bei Zimmertemperatur. Das Verfallsdatum ist auf der Verpackungsrückseite aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Überschreiten des Verfallsdatums.

INHALTSSTOFFE

Zeolith MED® Pulver:	100% Klinoptilolith-Zeolith
Zeolith MED® Pulver ultrafein:	100% Klinoptilolith-Zeolith ultrafein
Bentonit MED® Pulver:	100% Montmorillonit-Bentonit
ZeoBent MED® Pulver:	80% Klinoptilolith-Zeolith, 20% Montmorillonit-Bentonit
ZeoBent MED® Pulver ultrafein:	50% Klinoptilolith-Zeolith ultrafein, 50% Montmorillonit-Bentonit

Zeolith MED® Kapseln:	100% Klinoptilolith-Zeolith ultrafein, 500 mg je Cellulosekapsel
Bentonit MED® Kapseln:	100% Montmorillonit-Bentonit, 700 mg je Cellulosekapsel
ZeoBent MED® Kapseln:	50% Klinoptilolith-Zeolith ultrafein, 50% Montmorillonit-Bentonit, 500 mg je Cellulosekapsel

Zeolith MED® + Flohsamen:	50% Klinoptilolith-Zeolith, 50% Bio-Flohsamenschalen
Bentonit MED® + Flohsamen:	50% Montmorillonit-Bentonit, 50% Bio-Flohsamenschalen
ZeoBent MED® + Flohsamen:	40% Klinoptilolith-Zeolith, 10% Montmorillonit-Bentonit, 50% Bio-Flohsamenschalen

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Inhalt und Verpackung können mit dem Hausmüll entsorgt werden, Violettgläser im Grünglascontainer.

MEDIZINPRODUKTEHERSTELLER

ZeoBent Handels GmbH
Weißen 2, D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel, Deutschland
Telefon: +49 (0) 36742 673937
E-Mail: info@zeolith-bentonit-versand.de
Internet: www.zeolith-bentonit-versand.de



Stand der Information: 08/2019